

Compat ella®

Mobile Enterale Ernährungspumpe

Die Compat Ella® Pumpe ist eine innovative mobile enterale Ernährungspumpe mit einer einzigartigen benutzerfreundlichen Oberfläche in der Landessprache.

Funktionen auf einen Blick

- Kontinuierliche oder Intervall-Ernährungsprogramme mit Förderraten von 1 ml bis 4.000 ml, mit oder ohne voreingestelltem Zielvolumen
- Förderraten von 1 ml/h bis 600 ml/h
- Förderraten- und Applikationsverlauf sind jederzeit im Betriebsmodus sichtbar

Einfach zu Erlernen und zu Verstehen

- Farbdisplay mit leicht verständlichen Symbolen für Pumpenstatus, Akkulaufzeit und Pumpenmodus
- Übersichtliche U-förmige Tastatur mit intuitiver Kennzeichnung in Form von Symbolen
- Bildschirm-Volltextzeile zur Übermittlung des Pumpenstatus und zur einfachen Programmierung von Nahrungsapplikationen und Problemlösung

Genau und Sicher

- Alarmer bei Okklusionen stromauf- und abwärts und bei Luft im Set
- Fördergenauigkeit +/- 5 %
- AAFF-Technologie: Auto-Anti-Free-Flow für verbesserte Patientensicherheit
- Getrennte Verläufe für 1) die aktuelle Nahrungsapplikation und 2) das Gesamtvolumen
- Tastatursperre zur Vermeidung versehentlicher Änderungen

Robust

- 5-jährliches Wartungsintervall
- Kann unter fließendem warmen Wasser gereinigt werden

Mobil

- Leicht und mobil, kann in jeder Lage betrieben werden
- 24-Stunden Akkulaufzeit bei einer Förderrate von 125 ml/h

Erweiterte Funktionen

- PDMS-Verbindung (Patientendaten-Managementsysteme)
- Intervallmodus verabreicht bestimmte Volumen in vorgegebenen Intervallen
- Applikationsvorgabensperre zur Vermeidung versehentlicher Änderungen der Applikationsvorgaben
- 30-Tage-Ernährungsverlauf



Inhalt des Compat Ella® Pumpensets

- Compat Ella® Pumpe
- Wechselstrom-Adapter
- Schraubhalterung
- Gebrauchsanweisung

Compat Ella® Überleitsets

- Spike Set
- Combiset 1,5 l
- Universalset
- Doppel-Spike Set

Compat Ella® Zubehör

- Rucksack
- Rucksatzzeinsatz / Tischständer
- PDMS Anschlusskabel
- Schwesternruf Anschlusskabel

Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Referenz	Artikelnummer	Anz./VE
Compat Ella® Pumpe	12272020	12367032	1

Kennen Sie Compat Ella®?

Compat Ella® Mobile Enterale Ernährungspumpe

Funktionen der Pumpe

Fördergenauigkeit: +/- 5 %.

AAFF: Auto-Anti-Free-Flow (mittels Überleitset).

Tastatur: Ergonomische U-förmige Tastatur mit leicht identifizierbaren Symbolen.

Bildschirm: Farbdisplay zur Hervorhebung des Pumpenstatus.

Bediensprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Tschechisch, Slowakisch, Portugiesisch und Polnisch.

Vom Benutzer einstellbar.

Programm „Kontinuierlich“: Kontinuierliche Applikation. Mit oder ohne voreingestelltem Zielvolumen.

Förderrate: 1 bis 600 ml/h in 1-ml/h-Schritten.

Voreingestelltes Zielvolumen: 1 bis 4.000 ml in 1-ml/h-Schritten.

Alarmer: Luft im Set, Okklusion stromaufwärts/stromabwärts (unabhängig voneinander), offene Tür, keine Kassette, Zielvolumen erreicht, Pumpe wartet bei Inaktivität, Akku.

Verabreichtes Volumen: Das während der aktuellen aktiven Nahrungsapplikation verabreichte Volumen. Vom Benutzer zurücksetzbar.

Gesamtvolumen: Gesamtvolumen, das seit dem Zurücksetzen der Parameter durch den Benutzer verabreicht wurde.

30-Tage-Volumen-Verlauf: Das Gesamtvolumen, das während der letzten 30 Tage jeweils innerhalb von 24 Stunden zugeführt wurde.

Einstellungen: Alarmtonlautstärke, Intensität der Hintergrundbeleuchtung, Beleuchtungsdauer, Alarm bei erreichtem Zielvolumen (ja/nein), Tastensperre (ein/aus).

Befüllen: Automatisch mit einem Tastendruck (17 ml) oder manuell.

Erweiterte Funktionen

Programm „Intervall“: Die Applikation bestimmter Bolusmengen in ml in vorgegebenen Intervallen. Bolus von 1 bis 2.000 ml. Das Intervall kann auf 15 Minuten bis 12 Stunden eingestellt werden. Mit oder ohne voreingestelltem Zielvolumen.

Sperre des Programms „Intervall“: Das Programm „Intervall“ steht dem Benutzer nicht zur Verfügung.

Applikationsvorgabensperre: Sperrt alle aktuellen Parameter der Nahrungsapplikation, sodass diese nicht vom Benutzer geändert werden können.

Kommunikation: PDMS oder Schwesternruf.

Datum: Datum und Zeit vom Benutzer einstellbar.

Patientendaten-Managementsystem

Compat Ella® kann an typische auf der Intensivstation verwendete PDMS-Systeme angeschlossen werden, um die Ernährungsapplikation bei einzelnen Patienten automatisch zu überwachen. Der mechanische Anschluss erfolgt über ein kundenspezifisches serielles Kabel. Spezielle Softwaretreiber sind auf Anfrage erhältlich.

Garantie und Anforderungen

Garantie: 2 Jahre.

Wartung: Eine Wartung ist nur alle 5 Jahre erforderlich.

Servicecenter: Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden. Kontaktieren Sie Ihren Compat® Vertriebsvertreter oder einen autorisierten Compat® Servicedienstleister.

Technische Daten der Pumpe

Pumpengewicht: 499 g.

Akku: Li-Ion. Läuft 24 Stunden bei 125 ml/h mit Wasser. Akkuladezeit von 6 Stunden.

Abmessungen Pumpe: L: 140 mm × B: 140 mm × H: 62 mm.

Verpackung: Einzeln in einem Karton verpackt.

Lagerung: Bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.

Klassifizierung: Klasse IIa.

Gehäuse-Schutzart: IP25.

CE-Kennzeichnung: Entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG. Eine CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten benannten Stelle ausgestellt: TÜV SÜD.

Rechtmäßiger Hersteller: Axiom MTech S.A., Allée de la Petite Prairie 4, CH-1260 Nyon, Schweiz.

Ursprungsland: In Litauen hergestellt.

Compat Ella® Online

Website:

www.compat.com

Schulungszentrum:

www.compatella.com

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat® Vertriebsvertreter oder auf der Webseite unter www.compat.com.
*Sofern nicht anders angegeben, werden alle Warenzeichen mit Genehmigung verwendet.
Dieses Dokument ersetzt nicht die Original-Gebrauchsanweisung, die vor dem Gebrauch gelesen werden muss.

AXI00012 REV.3 05. DEZEMBER 2022

Compat®