

Compat[®] Gravity

Compat[®] Schwerkraft-Spike-Set

Das Compat[®] Schwerkraft-Spike-Set ist für die enterale Verabreichung von Nahrung, Flüssigkeiten oder Medikamenten und eignet sich zur Verwendung unter Schwerkraft.

Merkmale auf einen Blick


Das Compat[®]-Schwerkraft-Spike-Set verfügt über einen ENPlus-Ernährungskonnektor, eine Tropfkammer, eine Rollklemme, einen ENFit[®]-Y-Medikamentenport und ein distales ENFit[®]-Ende.

Patientensicherheit: Das Compat[®]-Schwerkraft-Spike-Set beinhaltet ENFit[®]-Konnektoren nach ISO 80369-3 und ENPlus-Konnektoren nach ISO 18250-3. Die ENFit[®]- und ENPlus-Konnektoren sind so konzipiert, dass sie mit intravenösen Infusionssets inkompatibel sind, um **die Patientensicherheit zu erhöhen**, da ein versehentlicher Anschluss von falschen Sets unmöglich ist.

Sichere Materialien: Das Compat[®]-Schwerkraft-Spike-Set ist **steril und frei von DEHP, BPA und Latex**.*

Kompatibilität:

- Nahrungsbehälter: ENPlus
- Enterale Ernährungssonden: ENFit[®]
- Spritzen: ENFit[®]

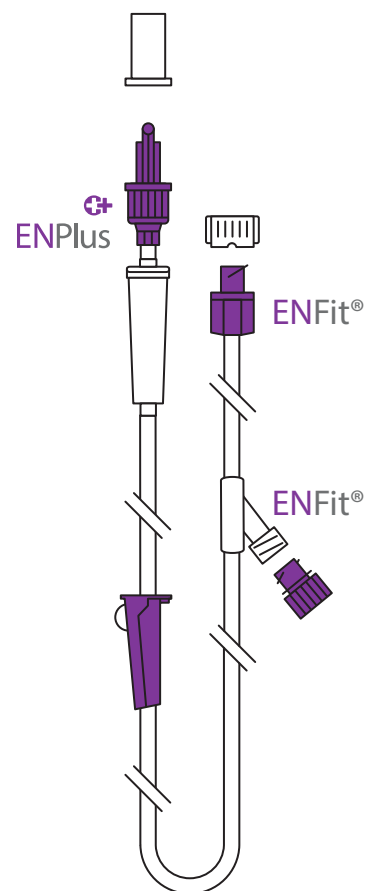


Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Produktcode	Menge/Box
Compat [®] Schwerkraft-Spike-Set	12298205	30

Patientenversorgung. Unsere Priorität.

Compat® Schwerkraft-Spike-Set

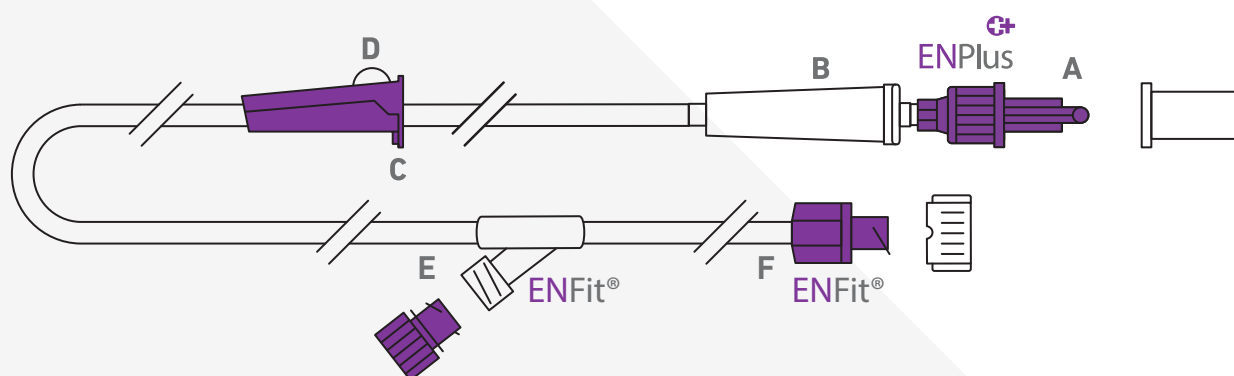

Komponenten

- A Proximales ENPlus-Ende „nur enteral“ (Ernährungsanschluss) mit Drehverschluss und Verschlusskappe
- B Tropfkammer
- C Integrierte Aufhängung, um das distale Ende des Verabreichungssets vor Schmutz zu schützen
- D Rollklemme zum Abklemmen oder Einstellen der Flussrate
- E ENFit®-Y-Medikamentenport mit Verschlusskappe
- F Distales ENFit®-Ende mit Verschlusskappe (patientenseitiger Sondenanschluss)

Technische Daten

Steril:	Sterilisiert mit Ethylenoxid (EO).
Verpackung:	Einzel verpackt in Kartons zu 30 Stück (29,5 x 26 x 22 cm).
Lagerung:	Bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Luftfeuchtigkeit schützen.
Haltbarkeit:	3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
Dauer der Anwendung:	24 Stunden. Zur Einmalanwendung.
Sondenlänge:	Abstand vom Ernährungsanschluss zum patientenseitigen Sondenanschluss: 180 cm.
Sondendurchmesser:	Nenn-Innendurchmesser: 4,0 mm. Nenn-Außendurchmesser: 5,4 mm.
ISO-Norm:	ENFit®-Konnektor nach ISO 80369-3 und ENPlus-Konnektor nach ISO 18250-3.
CE-Kennzeichnung:	Entspricht der europäischen Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG. Eine CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten benannten Stelle ausgestellt: TÜV SÜD (CE0123).
Klassifizierung:	Klasse Is.
Herstellerangaben:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Nachhaltigkeit:	Das Environmental Management System entspricht ISO 14001:2015.
Materialien:	Schlauchsystem: PVC. Alle Materialien sind frei von DEHP, BPA und Latex.* Weitere Einzelheiten auf Anfrage.
Herkunftsland:	Hergestellt in Italien.

* DEHP und BPA werden während des Herstellungsprozesses nicht absichtlich hinzugefügt. Enthält kein Naturkautschuklatex.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat®-Vertreter oder auf der Webseite unter www.compat.com

*Soweit nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Genehmigung verwendet.

AXI00035 REV.0 17. JUNI 2021

Compat®