

Compat[®] Modum

Geschlossenes System zur Absaugung von Magenresten und Messzubehör

Compat[®] Modum ist für die Verwendung als Zubehör vorgesehen, um die Absaugung von Magenresten im geschlossenen System und deren mögliche Wiedereinführung in den Magen des Patienten zu ermöglichen, wenn es in Verbindung mit entsprechenden Sonden, Spritzen und Sammelbeuteln verwendet wird. Auch für die Verwendung zur enteralen Ernährung und Medikamentengabe vorgesehen.

Merkmale auf einen Blick

Compat[®] Modum ist ein Zubehörteil, das zwischen der Ernährungssonde und dem Verabreichungsset platziert wird, um die Absaugung der Magenflüssigkeit und die GRV*-Messung zu erleichtern.


Anwenderfreundlich:

- Compat[®] Modum ermöglicht die Absaugung von Magenresten im geschlossenen System in einen Drainage-Sammelbeutel, wodurch die Exposition gegenüber Magenflüssigkeiten und deren Geruch reduziert und das Kontaminationsrisiko gesenkt wird.
- Es verfügt über zwei 3-Wege-Konnektoren, die es ermöglichen, den Flussweg zu wählen, um einfach von der Magenentleerung zur enteralen Ernährung oder Medikamentengabe zu wechseln.
- Es ist mit den meisten enteralen Ernährungssonden, Medikamentendispensern und Drainage-/Absauggeräten kompatibel.**

Sichere Materialien: Compat[®] Modum ist steril und frei von DEHP, BPA und Latex.***

Kompatibilität:

- Verabreichungssets: ENFit[®]
- Enteralen Ernährungssonden: ENFit[®] und ENLock
- Spritzen: ENFit[®], ENLock und Luer
- Drainage-/Absauggeräte: Trichter**

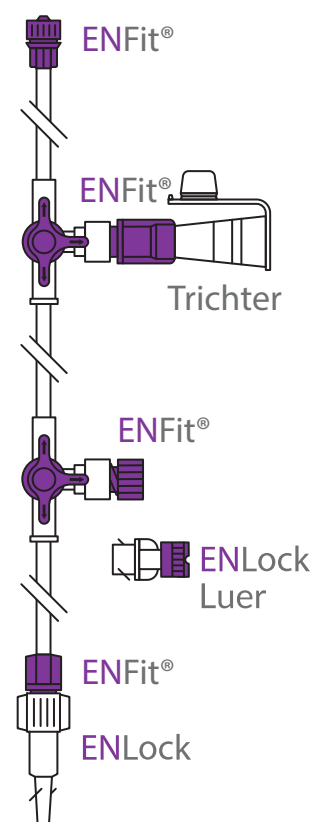


Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Produktcode	Menge/Box
Compat [®] Modum	12340186	50

Patientenversorgung. Unsere Priorität.

Geschlossenes System zur Absaugung von Magenresten und Messzubehör

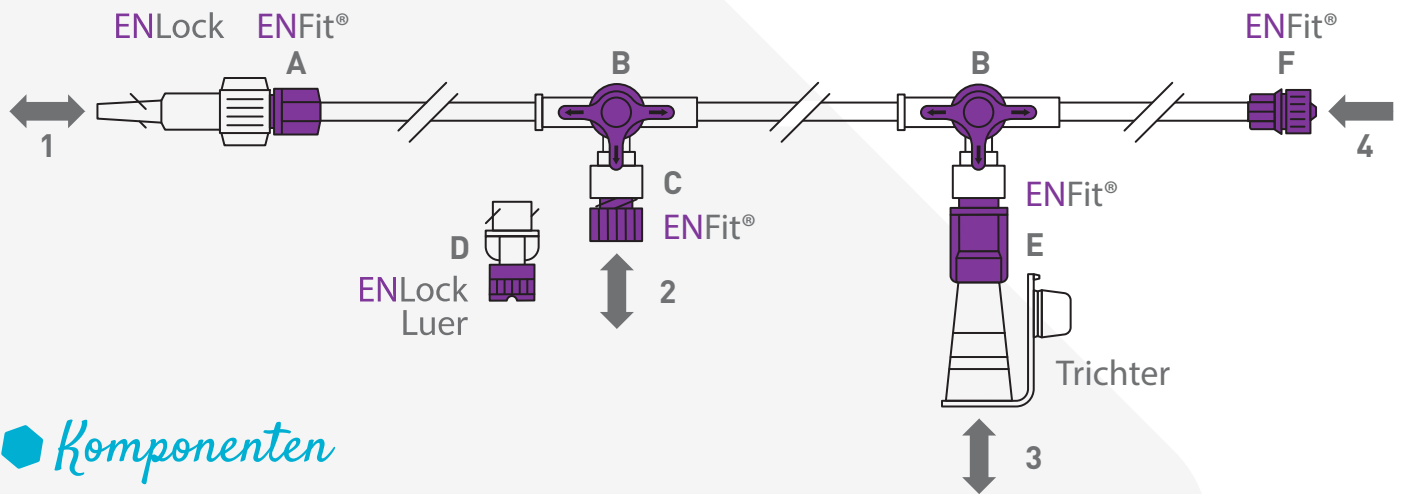

Komponenten

- A Weibliches distales ENFit®-Ende mit abnehmbarem ENLock-Adapter
- B ENFit® 3-Wege-Konnektor zur Wahl des Flussweges
- C Männlicher ENFit® Drainage-Spritzenport/Medikamentenport mit Verschlusskappe
- D ENLock-Adapter mit Verschlusskappe kompatibel mit Luer-, Oral- und ENLock-Medikamentendispensern/ Drainagespritzen
- E Trichterkonnektor mit Verschlusskappe, der mit den meisten Drainage-/Absauggeräten kompatibel ist**
- F Männlicher proximaler ENFit®-Konnektor zum Anschluss an das Verabreichungsset

Flusswege

- 1 Zur oder von der Ernährungssonde (patientenseitiger Anschluss)
- 2 Zu oder von der Drainagespritze/vom Medikamentendispenser
- 3 Zu oder von Drainage-/Absauggeräten
- 4 Vom Verabreichungsset (ernährungsseitiger Anschluss)

Technische Daten

- Steril:** Sterilisiert mit Ethylenoxid (EO).
- Länge:** 12 cm.
- Verpackung:** Einzeln verpackt in Kartons zu 50 Stück (295 x 260 x 190 mm).
- Lagerung:** Trocken bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- Haltbarkeit:** Bis zu 3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
- Dauer der Anwendung:** Bis zu 7 Tage. Zur Einmalanwendung.
- ISO-Norm:** ENFit®-Konnektor nach ISO 80369-3.
- CE-Kennzeichnung:** Entspricht der europäischen Medizinprodukteverordnung 2017/745. Eine CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten benannten Stelle ausgestellt: TÜV SÜD (CE0123).
- Klassifizierung:** Klasse IIa.
- Herstellerangaben:** Cedec Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
- Nachhaltigkeit:** Das Environmental Management System entspricht ISO 14001.
- Materialien:** Schlauchsystem: PVC. Alle Materialien sind frei von DEHP, BPA und Latex.***
- Herkunftsland:** Hergestellt in Italien.

* GRV: Magenrestvolumen.

** Es ist jedoch möglich, dass Inkompatibilitäten auftreten.

*** DEHP und BPA werden während des Herstellungsprozesses nicht absichtlich hinzugefügt. Enthält kein Naturkautschuklatex.

Dieses Dokument ersetzt nicht die Original-Gebrauchsanweisung, die vor dem Gebrauch gelesen werden muss. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat®-Vertreter oder auf der Webseite unter www.compat.com

*Soweit nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Genehmigung verwendet.

AXI00037 REV.1 18. MÄRZ 2026

Compat®