

# Compat<sup>®</sup> Gastrotube

## Gama Completa de Sondas de Gastrostomía con Balón

Las sondas de gastrostomía con balón de silicona Compat<sup>®</sup> Gastrotube están diseñadas para su uso en pacientes que requieren una administración enteral intermitente o continua de nutrientes, fluidos o medicación al tracto digestivo. Estas sondas también son aptas para la descompresión gástrica.

### Características Generales


Las sondas Compat<sup>®</sup> Gastrotube están disponibles en una amplia gama de calibres (12/14/16/18/20/22/24 Fr) y volúmenes de balón (5, 10 y 15 cc), con el fin de satisfacer la mayoría de las necesidades clínicas.

#### Confort del Paciente:

- Balón de silicona resistente que **prolonga la duración máxima de uso y reduce la frecuencia de sustitución de la sonda**.
- Fabricado en silicona suave, transparente y biocompatible y con punta recubierta **para evitar erosiones en la pared del estómago**.
- Disco de retención de silicona con orificios de ventilación y topes elevados que permiten que el aire circule alrededor del estoma, lo que puede **ayudar a disminuir la irritación de la piel**.

**Comodidad:** las sondas Compat<sup>®</sup> Gastrotube cuentan con un conector de medicación ENFit<sup>®</sup> incorporado que **simplifica la administración de medicación**.

**Seguridad del Paciente:** las sondas Compat<sup>®</sup> Gastrotube incluyen conectores ENFit<sup>®</sup>, que están diseñados para ser incompatibles con la administración IV, con el objetivo de **incrementar la seguridad del paciente** e impedir errores de conexión accidentales. Todas las sondas están libres de DEHP, BPA y látex\*.

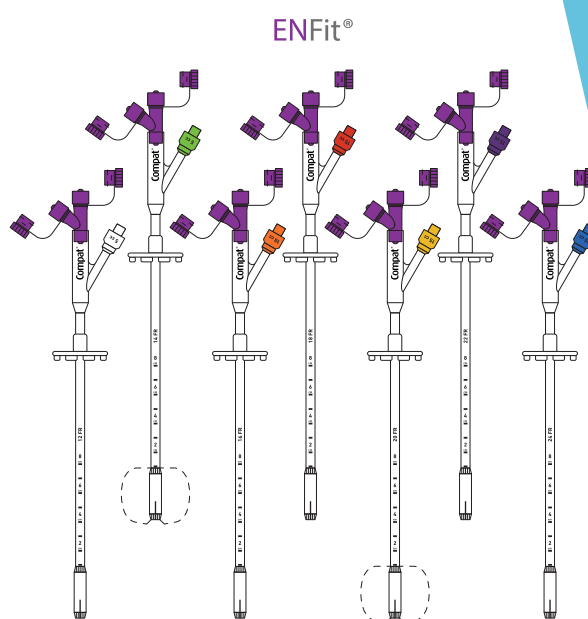


### Información de Pedido

| Descripción                          | Código   | Color de la válvula | Tamaño del balón | Diámetro exterior nominal | Cantidad | Calibre | Longitud |
|--------------------------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------------|----------|---------|----------|
| Compat <sup>®</sup> Gastrotube 12 Fr | 12480167 |                     | 5 cc             | Ø 4,0                     | 1        | 12 Fr   | ±255 mm  |
| Compat <sup>®</sup> Gastrotube 14 Fr | 12287616 |                     | 5 cc             | Ø 4,7                     | 1        | 14 Fr   | ±255 mm  |
| Compat <sup>®</sup> Gastrotube 16 Fr | 12287746 |                     | 10 cc            | Ø 5,3                     | 1        | 16 Fr   | ±255 mm  |
| Compat <sup>®</sup> Gastrotube 18 Fr | 12287607 |                     | 15 cc            | Ø 6,0                     | 1        | 18 Fr   | ±255 mm  |
| Compat <sup>®</sup> Gastrotube 20 Fr | 12287606 |                     | 15 cc            | Ø 6,7                     | 1        | 20 Fr   | ±255 mm  |
| Compat <sup>®</sup> Gastrotube 22 Fr | 12287605 |                     | 15 cc            | Ø 7,3                     | 1        | 22 Fr   | ±255 mm  |
| Compat <sup>®</sup> Gastrotube 24 Fr | 12287604 |                     | 15 cc            | Ø 8,0                     | 1        | 24 Fr   | ±255 mm  |

*El Cuidado del Paciente. Nuestra Prioridad.*

# Gama Completa de Sondas de Gastrostomía con Balón

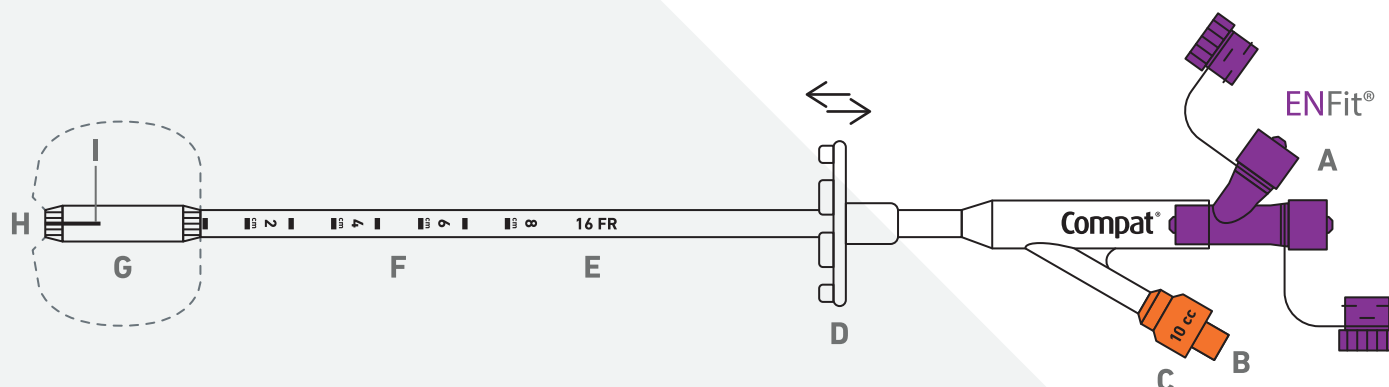

## Componentes

- A** Conector de nutrición ENFit® con cierre a rosca, con puerto de medicación integrado y con tapón en ambas entradas
- B** Válvula de inflado con conector Luer
- C** Código de colores para identificar el calibre e identificación impresa del volumen de inflado del balón
- D** Disco de retención de silicona de 37 mm de ancho con orificios de ventilación y diseño con topes elevados
- E** Calibre (FR) impreso en el eje
- F** Diseño de sonda de silicona suave, transparente y biocompatible con marcadores de profundidad de colocación cada centímetro
- G** Balón de silicona altamente resistente
- H** Extremo distal abierto y cónico (extremo distal recubierto en estado inflado)
- I** Tira radiopaca para confirmación del posicionamiento

## Especificaciones Técnicas

|                               |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estériles:</b>             | Esterilizadas con óxido de etileno (EO).                                                                                                           |
| <b>Embalaje:</b>              | Embaladas individualmente en blísteres estériles, en cajas de 1 unidad (370×100×40 mm).                                                            |
| <b>Almacenaje:</b>            | Almacenar en el envase original a temperatura ambiente y en un lugar seco.<br>Evitar la luz solar directa y la radiación térmica.                  |
| <b>Período de validez:</b>    | 5 años a partir de la fecha de producción. Fecha de caducidad impresa en el embalaje.                                                              |
| <b>Duración de uso:</b>       | Indicadas para uso a largo plazo. Un solo uso.                                                                                                     |
| <b>Longitud de la sonda:</b>  | Longitud nominal total: $\pm 255$ mm.                                                                                                              |
| <b>Diámetros de la sonda:</b> | Diámetro externo nominal: desde 12 Fr ( $\pm 4,0$ mm) hasta 24 Fr ( $\pm 8,0$ mm).                                                                 |
| <b>Norma ISO:</b>             | Conector ENFit® fabricado de conformidad con la norma ISO 80369-3.                                                                                 |
| <b>Marca CE:</b>              | Cumplen la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE. Certificación CE emitida por un Organismo Notificado acreditado: TÜV SÜD (CE0123). |
| <b>Clasificación:</b>         | Clase IIb.                                                                                                                                         |
| <b>Fabricante legal:</b>      | Degania Silicone Ltd.                                                                                                                              |
| <b>Materiales:</b>            | Conexiones: goma de silicona. Todos los materiales están libres de DEHP, BPA y látex*.                                                             |

\*No se añaden DEHP y BPA intencionadamente durante el proceso de fabricación. No están formuladas con látex de caucho natural.

Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite [www.compat.com](http://www.compat.com)

®Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales se utilizan con la debida autorización.  
Este documento no sustituye a las Instrucciones de Uso originales, que deben leerse antes de la utilización.

AXI00028 REV.1 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

# Compat®