

Compat® Gastrotube

Brett Sortiment av Gastrostomisonder med Silikonballong

Compat® Gastrotube gastrostomisonder med silikonballong är avsedda för användning till patienter som behöver intermittert eller kontinuerlig administrering av näring, vätska eller läkemedel via en etablerad stomi. Sonderna kan också användas för gastrisk dekompression.

Egenskaper i Korthet


Compat® Gastrotuber finns tillgängliga i flera storlekar (12/14/16/18/20/22/24 FR) och ballongvolym (5, 10 och 15 cc) för att fylla de flesta patientbehoven.

Patientkomfort:






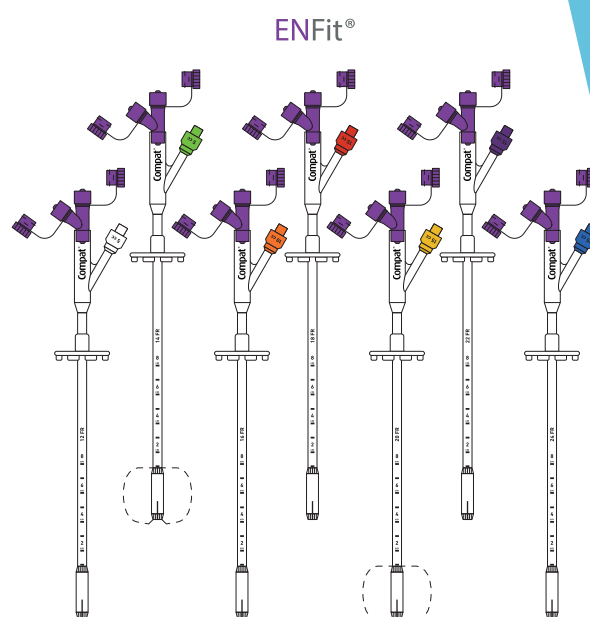

- Hållbar silikonballong för att **främja maximal användningstid och begränsa behovet av sondbyte.**
- Tillverkad av mjuk, genomskinlig och biokompatibel silikon och utrustad med en försänkt spets för att vara **skonsam mot bukväggen.**
- Fixeringsplatta i silikon med lufthål och upphöjda fötter möjliggör cirkulation av luft runt stomiöppningen vilket kan **minska risken för hudirritation.**

Fördelar: Compat® Gastrotuber är utrustade med integrerade ENFit® läkemedelsportar för att **underlätta tillförsel av läkemedel** och är individuellt förpackade i en steril blisterförpackning.

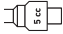Patientsäkerhet: Compat® Gastrotuber är utrustade med ENFit®-kopplingar som är IV-inkompatibla för att **främja patientsäkerheten**, genom att förhindra oavsiktliga felkopplingar. Alla sonder är fria från DEHP, BPA och latex*.




Beställningsinformation

Produktnamn	Produktkod	Ventilfärg	Ballong Storlek	Nominell Yttre Storlek	Kvantitet	Storlek	Längd
Compat® Gastrotube 12 FR	12480167		5 cc	Ø 4.0	1	12 FR	± 255 mm
Compat® Gastrotube 14 FR	12287616		5 cc	Ø 4.7	1	14 FR	± 255 mm
Compat® Gastrotube 16 FR	12287746		10 cc	Ø 5.3	1	16 FR	± 255 mm
Compat® Gastrotube 18 FR	12287607		15 cc	Ø 6.0	1	18 FR	± 255 mm
Compat® Gastrotube 20 FR	12287606		15 cc	Ø 6.7	1	20 FR	± 255 mm
Compat® Gastrotube 22 FR	12287605		15 cc	Ø 7.3	1	22 FR	± 255 mm
Compat® Gastrotube 24 FR	12287604		15 cc	Ø 8.0	1	24 FR	± 255 mm

Patientvård. Vår Prioritet.

Brett Sortiment av Gastrostomisonder med Silikonballong

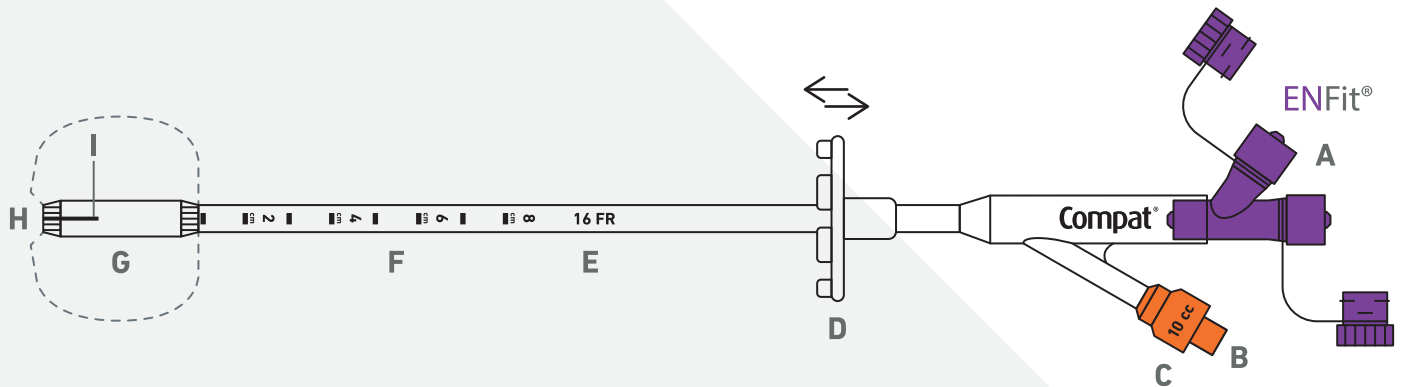

Komponenter

- A ENFit® matningsport med skruvlock och integrerad läkemedelsport
- B Ballongventil med Luer-koppling
- C Storlekar identifierade med färgkod och markerad ballongventilsvolym
- D 37 mm bred upphöjd justerbar fixeringsplatta i silikon med ventilationshål
- E Storlek (FR) markerad på skaftet
- F Mjuk, genomskinlig och biokompatibel silikonsond med markeringar för placeringsdjup med 1 centimeters mellanrum
- G Hållbar silikonballong
- H Öppen och avsmalnande distal ände (försänkt distal ände när ballongen är uppblåst)
- I Röntgentät remsa för bekräftelse av placering och position

Specifikationer

Steril:	Steriliserad med etylenoxid (EO).
Förpackning:	Individuellt förpackad i kartong med 1 styck (370 × 100 × 40 mm).
Förvaring:	Förvara i originalförpackning vid rumstemperatur och i en torr miljö. Skyddas från direkt solljus och värmestrålning.
Hållbarhetstid:	5 år från tillverkningsdatum. Utgångsdatum finns på förpackningen.
Användningstid:	Långtidsbruk. Engångsbruk.
Sondlängd:	Total nominell längd: ± 255 mm.
Sonddiameter:	Nominell yttre diameter: från 12 FR (± 4,0 mm) till 24 FR (± 8,0 mm).
ISO-standard:	ENFit®-kopplingar är tillverkade i enlighet med ISO 80369-3.
CE-märkning:	Överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TUV SUD/CE0123.
Klassificering:	Klass IIb.
Juridisk tillverkare:	Degania Silicone Ltd.
Material:	Sond: silikongummi. Alla material är fria från DEHP, BPA och latex*.

*Inget DEHP och BPA tillsätts avsiktligt under tillverkningsprocessen. Naturgummilatex tillsätts inte.

För ytterligare information kontakta din Compat®-representant eller besök www.compat.com

*Alla varumärken används med tillstånd, om inte annat anges.

Detta dokument ersätter inte bruksanvisningen som måste läsas före användning.

AXI00028 REV.1 22 NOVEMBER 2022

Compat®