

Compat[®] Buddy

Gamma Completa di Bottoni Gastrostomici

Il bottone gastrostomico a palloncino Compat Buddy è progettato per pazienti che necessitano di somministrazione enterale, intermittente o continua, in sede gastrica di sostanze nutritive, fluidi o medicinali. Adatto anche per la decompressione gastrica.

● *Panoramica delle Caratteristiche*


Il bottone Compat[®] Buddy è disponibile in varie dimensioni (12/14/16/18/20/24 FR), lunghezze (da 0,8 a 6,5 cm) e tipologie di kit per soddisfare la maggior parte delle esigenze cliniche e dei pazienti.

Comfort del Paziente:

- Sonda in silicone morbido biocompatibile e palloncino in silicone ad alta resistenza per massimizzare la durata di utilizzo e limitare le sostituzioni del bottone
- Con estremità distale ricoperta che permette di agire con delicatezza sulla parete dello stomaco
- Soluzione discreta e confortevole per offrire maggiore libertà di movimento al paziente

Facilità di Utilizzo: Il bottone Compat[®] Buddy è disponibile in due diversi kit. Il kit Compat[®] Buddy contiene un'ampia gamma di accessori ENFit[®] per una sostituzione facile e comoda del bottone o della sonda per gastrostomia. Il Compat[®] Buddy Compact Kit offre una soluzione ecologica con accessori essenziali. Entrambi i kit sono forniti in confezioni individuali sterili con due etichette rimovibili per migliorarne la tracciabilità.

Materiali Sicuri: Privi di DEHP, BPA e lattice*.

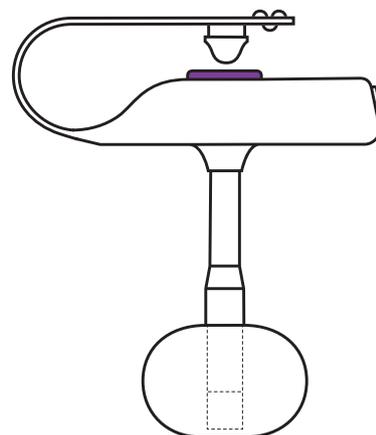

● *Gamma Prodotti*

Lunghezza (mm)	8	10	12	15	17	20	23	25	27	30	35	40	45	50	55	60	65
Calibro (FR)	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

La Cura del Paziente. La Nostra Priorità.

Gamma Completa di Bottoni Gastrostomici

Contenuto del Kit

Compat® Buddy Kit	Compat® Buddy Compact Kit
Bottone Gastrostomico Compat® Buddy	Bottone Gastrostomico Compat® Buddy
2 Set di Estensione ENFit®	Siringa Luer da 10 mL
Siringa ENFit® da 35 mL	Mandrino
Siringa Luer da 10 mL	Lubrificante Idrosolubile
Mandrino	2 Garze
Lubrificante Idrosolubile	
2 Garze	

Informazioni per gli Ordini


Compat® Buddy Kit

Lunghezza dello stoma (cm)	Calibro					
	12FR	14FR	16FR	18FR	20FR	24FR
0,8	12466557	12466601	12466635	12466759	12466828	12466844
1,0	12466535	12466577	12466642	12466795	12466835	12466864
1,2	12466544	12466600	12466636	12466784	12466841	12466847
1,5	12460321	12460325	12466761	12466785	12466836	12466870
1,7	12466556	12460330	12460320	12466798	12466815	12466865
2,0	12466534	12460327	12460341	12466823	12466842	12466846
2,3	12466543	12466568	12466745	12466824	12466817	12466856
2,5	12466555	12460342	12460352	12466825	12466837	12466871
2,7	12466554	12466576	12466719	12466805	12466818	12466857
3,0	12466561	12466589	12460347	12466830	12466838	12466869
3,5	12466560	12460331	12466752	12466806	12466839	12466868
4,0	12466551	12466620	12466753	12466826	12466863	12466859
4,5	12466528	12466598	12466770	12466807	12466862	12466890
5,0	12466527	12466621	12466762	12466808	12466852	12466892
5,5		12466616		12466811		
6,0		12466632		12466809		
6,5		12466626				

Compat® Buddy Compact Kit

Lunghezza dello stoma (cm)	Calibro					
	12FR	14FR	16FR	18FR	20FR	24FR
0,8	P00109	P00123	P00140	P00154	P00170	P00184
1,0	P00110	P00124	P00141	P00155	P00171	P00185
1,2	P00111	P00125	P00142	P00156	P00172	P00186
1,5	P00112	P00126	P00143	P00157	P00173	P00187
1,7	P00113	P00127	P00144	P00158	P00174	P00188
2,0	P00114	P00128	P00145	P00159	P00175	P00189
2,3	P00115	P00129	P00146	P00160	P00176	P00190
2,5	P00116	P00130	P00147	P00161	P00177	P00191
2,7	P00117	P00131	P00148	P00162	P00178	P00192
3,0	P00118	P00132	P00149	P00163	P00179	P00193
3,5	P00119	P00133	P00150	P00164	P00180	P00194
4,0	P00120	P00134	P00151	P00165	P00181	P00195
4,5	P00121	P00135	P00152	P00166	P00182	P00196
5,0	P00122	P00136	P00153	P00167	P00183	P00197
5,5		P00137		P00168		
6,0		P00138		P00169		
6,5		P00139				

Gamma Completa di Bottoni Gastrostomici

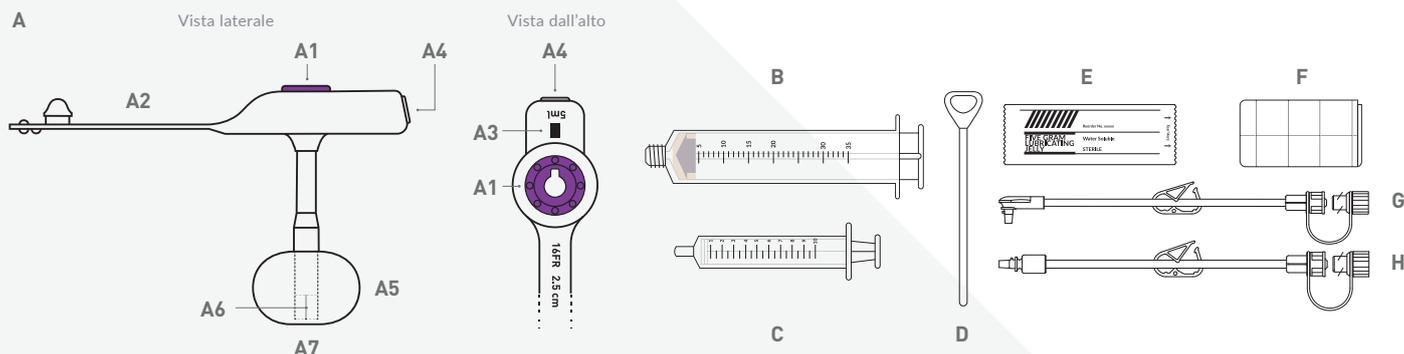

Componenti

- A** Bottone gastrostomico Compat® Buddy
A1 Porta per nutrizione di colore viola con valvola antiriflusso. Compatibile con set di estensione con connettore dritto e ad angolo retto
A2 Tappo con indicazione del calibro in French e della lunghezza
A3 Contrassegno di posizionamento per il set di estensione
A4 Valvola di gonfiaggio con connettore Luer e indicazione del volume del palloncino in mL

Calibro del bottone e volume del palloncino						
Calibro (FR)	12	14	16	18	20	24
Volume di gonfiaggio consigliato	3,0	4,0	5,0	5,0	8,0	8,0
Volume di gonfiaggio massimo	5,0	6,0	7,0	7,0	12,0	12,0

- A5** Palloncino in silicone ad alta resistenza
A6 Striscia radio-opaca per posizionamento e conferma della posizione
A7 Punta distale ricoperta
B Siringa ENFit® da 35 mL compatibile con i set di estensione ENFit®
C Siringa Luer per gonfiaggio del palloncino
D Mandrino
E Lubrificante idrosolubile
F Garze (2 pezzi)
G Set di estensione ENFit® singolo da 30 cm con connettore ad angolo retto
H Set di estensione ENFit® singolo da 30 cm con connettore dritto

Specifiche

- Sterile:** Sterilizzato con ossido di etilene (EO).
Confezionamento: Confezionato singolarmente.
Conservazione: Conservare nella confezione originale, a temperatura ambiente e in un ambiente asciutto. Tenere al riparo dalla luce solare e da radiazioni termiche.
Durata: 3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
Durata di impiego: Indicato per uso a lungo termine. Monouso.
Calibro e lunghezza: Da 12 a 24 FR e da 0,8 a 6,5 cm. Vedere tabella a pagina 1.
Marchio CE: Conforme alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Certificazione CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD (CE0123).
Classificazione: Classe IIb.
Fabbricante legale: Degania Silicone Ltd.
Materiali: Tubo in silicone. Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice*.

*Non vengono intenzionalmente aggiunti DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Non formulato con lattice di gomma naturale.

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito www.compat.com
 * Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.

AXI00044 REV.1 12 GIUGNO 2024

Compat®