

# Compat ella®

## Compat Ella® Set con spike

Il set con spike Compat Ella® è progettato per la somministrazione di sostanze nutritive, fluidi e/o medicinali per via enterale mediante l'utilizzo della pompa per nutrizione Compat Ella®.

### ● *Panoramica delle caratteristiche*

Il set con spike Compat Ella® è dotato di un connettore per la nutrizione ENPlus, di un rubinetto a 3 vie compatibile con ENFit® per la somministrazione di medicinali e di un'estremità distale con connettore ENFit® (collegamento sonda lato paziente).


**Nutrizione affidabile:** Il set con spike Compat Ella® è provvisto di meccanismo di sicurezza con tecnologia brevettata anti flusso libero Auto-Anti-Free-Flow (AAFF). Il meccanismo AAFF è integrato nella cassetta e si attiva sempre automaticamente per [tutelare la sicurezza del paziente](#).

**Connettori più sicuri:** Il set con spike Compat Ella® comprende connettori ENFit® realizzati in conformità allo standard ISO 80369-3 e un connettore ENPlus realizzato in conformità allo standard ISO 18250-3. I connettori ENFit® ed ENPlus sono progettati per non essere compatibili con i set per infusione endovenosa al fine di [promuovere la sicurezza del paziente](#) aiutando a evitare involontari collegamenti sbagliati.

**Materiali sicuri:** Il set con spike Compat Ella® è **sterile e privo di DEHP, BPA e lattice\***.

#### **Compatibilità:**

- Contenitori per sostanze nutritive: ENPlus
- Sonde per nutrizione enterale: ENFit®
- Siringhe: ENFit®

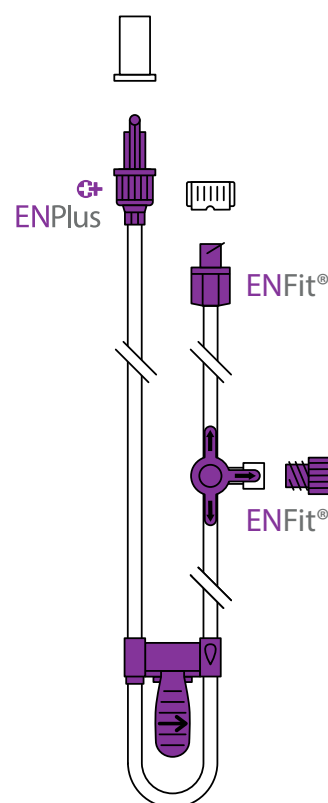


### ● *Informazioni per gli ordini*

Nome prodotto	Codice prodotto	N. pezzi/conf.
Compat Ella® Set con spike	12298203	30

*Conosci Compat Ella®?*

# Compat Ella® Set con spike

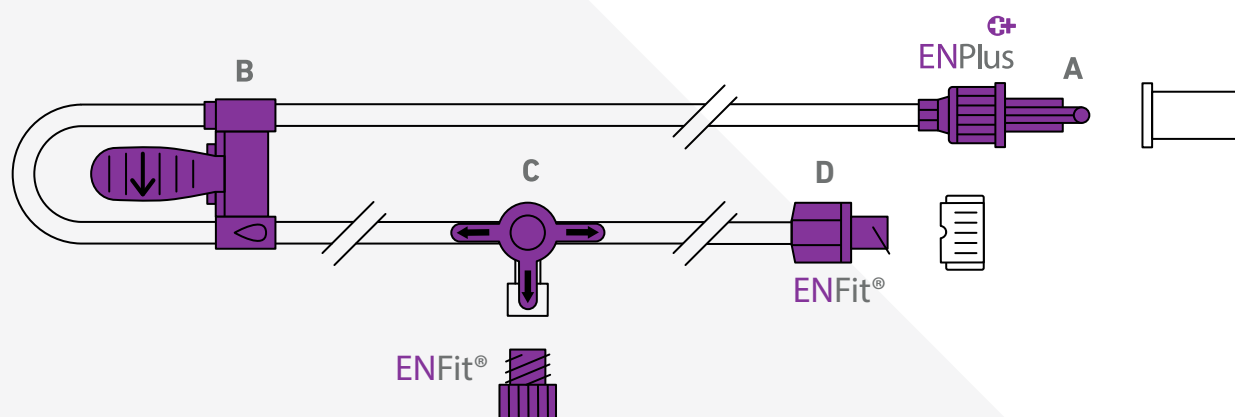

## Componenti

- A** Connettore ENPlus specifico per la nutrizione enterale con ghiera girevole e tappo (collegamento per la nutrizione)
- B** Cassetta per pompa Compat Ella® con meccanismo brevettato di sicurezza Auto-Anti-Free-Flow (AAFF) integrato
- C** Rubinetto a 3 vie compatibile con ENFit® per la somministrazione di medicinali provvisto di tappo
- D** Estremità distale con connettore ENFit® provvisto di tappo (collegamento per sonda lato paziente)

## Specifiche

- Sterile:** sterilizzato con ossido di etilene (EO).
- Confezionamento:** confezionato singolarmente in scatole da 30 pezzi (29,5 × 26 × 19 cm).
- Conservazione:** conservare a temperatura ambiente. Tenere al riparo dalla luce solare e dall'umidità.
- Durata:** 3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
- Durata di impiego:** 24 ore. Monouso.
- Lunghezza:** distanza tra il connettore per la nutrizione e il connettore per sonda lato paziente: 230 cm. Distanza tra il connettore per nutrizione e la pompa: 50 cm.
- Diametri:** diametro interno nominale di 3,0 mm; diametro esterno nominale di 4,15 mm.
- Standard ISO:** connettore ENFit® conforme allo standard ISO 80369-3 e connettore ENPlus conforme allo standard ISO 18250-3.
- Marchio CE:** conforme alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Certificazione CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD (CE0123).
- Classificazione:** classe IIa.
- Fabbricante legale:** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
- Sostenibilità:** sistema di gestione ambientale conforme a ISO 14001:2015.
- Materiali:** tubi in PVC e silicone. Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice\*. Ulteriori dettagli disponibili su richiesta.
- Paese di origine:** prodotto in Italia.

\*Non vengono intenzionalmente aggiunti DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Non formulato con lattice di gomma naturale.

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito [www.compat.com](http://www.compat.com)

\* Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.

AXI00405 REV.0 23 MARZO 2021