

# Compat® Gravity

## Compat® Gravity Set universale

Il set universale Compat® Gravity è progettato per la somministrazione di sostanze nutritive, fluidi o medicinali per via enterale mediante il metodo d'infusione per gravità.

### ● *Panoramica delle caratteristiche*


Il set universale Compat® Gravity è dotato di un connettore per la nutrizione ENPlus, di un adattatore universale con filtro per l'aria, di una camera di gocciolamento, di un regolatore di flusso a rotella, di una porta ENFit® a "Y" per la somministrazione di medicinali e di un'estremità distale con connettore ENFit®. È incluso anche un supporto separato per flaconi.

**Sicurezza del paziente:** Il set universale Compat® Gravity comprende connettori ENFit® realizzati in conformità allo standard ISO 80369-3 e un connettore ENPlus realizzato in conformità allo standard ISO 18250-3. I connettori ENFit® ed ENPlus sono progettati per non essere compatibili con i set per infusione endovenosa al fine di **promuovere la sicurezza del paziente** aiutando a evitare involontari collegamenti sbagliati.

**Materiali sicuri:** Il set universale Compat® Gravity è **sterile e privo di DEHP, BPA e lattice\***.

#### **Compatibilità:**

- Contenitori per sostanze nutritive: ENPlus, contenitori in vetro e plastica con imboccatura larga, bottiglie in vetro con tappo a corona
- Sonde per nutrizione enterale: ENFit®
- Siringhe: ENFit®

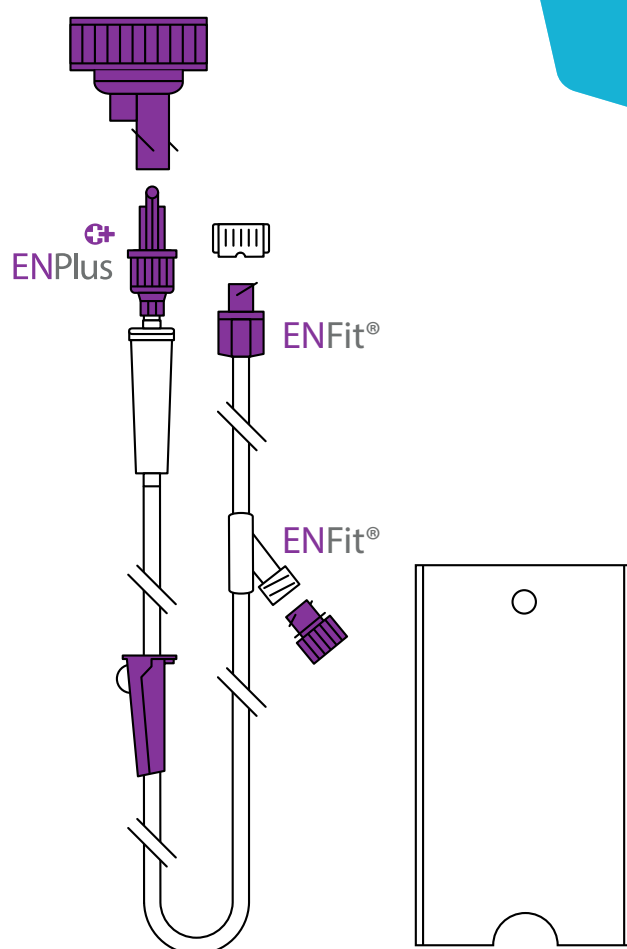


### ● *Informazioni per gli ordini*

Nome prodotto	Codice prodotto	N. pezzi/conf.
Compat® Gravity Set universale	12298230	30

*La cura del paziente. La nostra priorità.*

# Compat® Gravity Set universale

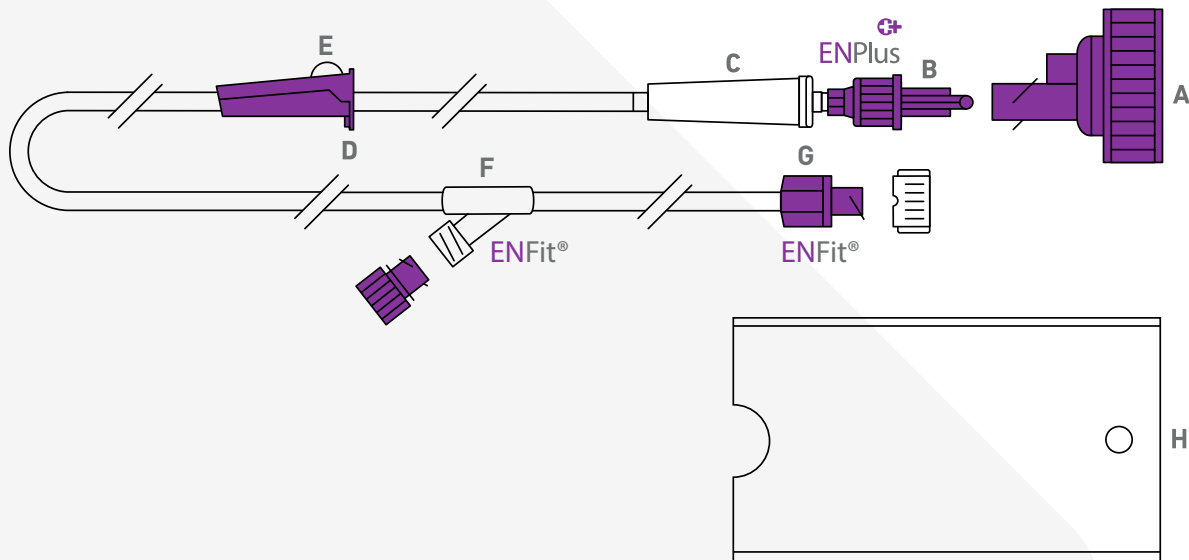

## Componenti

- A** Adattatore universale con filtro per l'aria e connettore ENPlus compatibile con contenitori in vetro e plastica con imboccatura larga (DIN 168-1) o bottiglie in vetro con tappo a corona (EN 14634 e EN 14635)
- B** Estremità prossimale con connettore ENPlus specifico per la nutrizione enterale con ghiera girevole (collegamento per la nutrizione)
- C** Camera di gocciolamento
- D** Supporto integrato per tenere l'estremità distale del set di somministrazione lontana da materiali e superfici non puliti
- E** Regolatore di flusso a rotella per regolare la velocità del flusso o arrestarlo completamente
- F** Porta ENFit® a "Y" per la somministrazione di medicinali provvista di tappo
- G** Estremità distale con connettore ENFit® provvisto di tappo (collegamento per sonda lato paziente)
- H** Supporto per flacone da 500 mL in LDPE (polietilene a bassa densità)

## Specifiche

- Sterile:** sterilizzato con ossido di etilene (EO).
- Confezionamento:** confezionato singolarmente in scatole da 30 pezzi (39 × 39 × 13 cm).
- Conservazione:** conservare a temperatura ambiente. Tenere al riparo dalla luce solare e dall'umidità.
- Durata:** 3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
- Durata di impiego:** 24 ore. Monouso.
- Lunghezza della sonda:** distanza tra il connettore per nutrizione e il connettore per sonda lato paziente: 180 cm.
- Diametro della sonda:** diametro interno nominale di 4,0 mm; diametro esterno nominale di 5,4 mm.
- Standard ISO:** connettore ENFit® conforme allo standard ISO 80369-3 e connettore ENPlus conforme allo standard ISO 18250-3.
- Marchio CE:** conforme alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Certificazione CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD (CE0123).
- Classificazione:** classe Is.
- Fabbricante legale:** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
- Sostenibilità:** sistema di gestione ambientale conforme a ISO 14001:2015.
- Materiali:** tubi in PVC. Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice\*. Ulteriori dettagli disponibili su richiesta.
- Paese di origine:** prodotto in Italia.

\* Non vengono intenzionalmente aggiunti DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Non formulato con lattice di gomma naturale.

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito [www.compat.com](http://www.compat.com)

\* Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.

AXI00036 REV.0 18 MARZO 2021