

# Compat<sup>®</sup> Modum

## Accessoire pour l'Aspiration et la Mesure du Résidu Gastrique en Circuit Fermé

Compat<sup>®</sup> Modum est un accessoire pour l'aspiration du résidu gastrique en circuit fermé et son éventuelle réintroduction dans l'estomac du patient. Pour utilisation avec des sondes, des seringues et des poches de collecte appropriées. Il convient également à la nutrition entérale et à l'administration de médicaments.

### Aperçu des Caractéristiques

Compat<sup>®</sup> Modum est un accessoire qui se place entre la sonde de nutrition et la tubulure d'administration pour faciliter l'aspiration du résidu gastrique et la mesure du volume résiduel gastrique (VRG).


#### Facilité d'Utilisation :

- Compat<sup>®</sup> Modum permet l'aspiration, en circuit fermé, du résidu gastrique dans une poche de collecte, **réduisant ainsi l'exposition aux fluides gastriques et aux odeurs ainsi que le risque de contamination.**
- Il est composé de deux connecteurs à 3 voies qui permettent de **sélectionner la voie d'écoulement des liquides** pour alterner facilement entre vidange gastrique et nutrition entérale ou administration de médicaments.
- Il est compatible avec la plupart des sondes de nutrition entérale, seringues pour médicaments et dispositifs de drainage/d'aspiration\*.

**Sécurité des Matériaux :** Compat<sup>®</sup> Modum est **stérile et exempt de DEHP, de BPA et de latex\*\*.**

#### Compatibilité :

- Tubulures d'administration : ENFit<sup>®</sup>
- Sondes de nutrition entérale : ENFit<sup>®</sup> et ENLock
- Dispositifs de drainage/d'aspiration : Godet\*

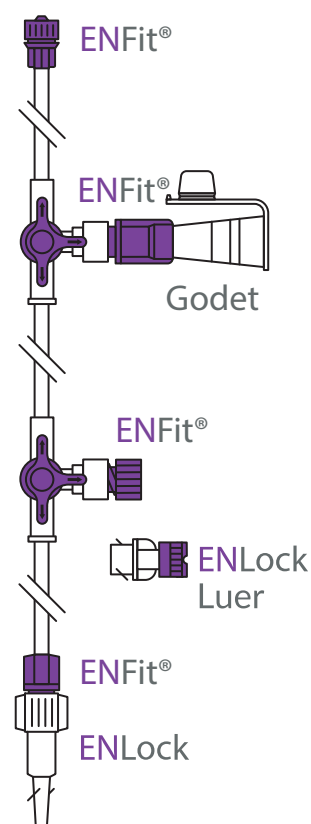


### Informations de Commande

Description	Numéro d'article	Unité de vente/carton
Compat <sup>®</sup> Modum	12340186	50

*Les Soins aux Patients. Notre Priorité.*

# Accessoire pour l'Aspiration et la Mesure du Résidu Gastrique en Circuit Fermé

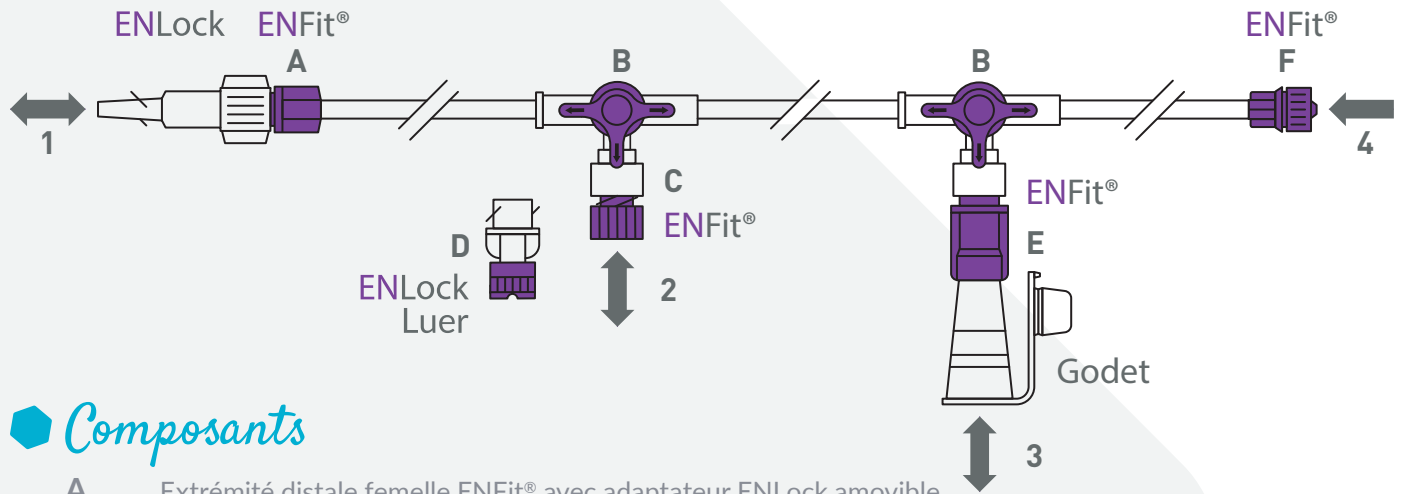

## Composants

- A Extrémité distale femelle ENFit® avec adaptateur ENLock amovible
- B Connecteurs à 3 voies compatible ENFit® pour sélectionner la voie d'écoulement
- C Port mâle compatible ENFit® pour seringue de drainage/médicaments avec bouchon
- D Adaptateur ENFit® avec bouchon compatible avec les seringues de drainage/pour médicaments Luer, Orales et ENLock
- E Connecteur godet avec bouchon conçu pour être compatible avec la plupart des dispositifs de drainage/d'aspiration\*
- F Connecteur proximal ENFit® mâle pour le raccord à la tubulure d'administration

## Voies d'Écoulement

- 1 Vers ou depuis la sonde de nutrition (raccord côté patient)
- 2 Vers ou depuis la seringue de drainage/pour médicaments
- 3 Vers ou depuis le dispositif de drainage/d'aspiration
- 4 Depuis la tubulure d'administration (raccord côté nutrition)

## Spécifications

<b>Stérile :</b>	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (EO).
<b>Longueur :</b>	12 cm.
<b>Emballage :</b>	Emballé individuellement en carton de 50 pièces (295 x 260 x 190 mm).
<b>Stockage :</b>	Stocker à température ambiante. Tenir à l'abri de la lumière du soleil et de l'humidité.
<b>Durée de conservation :</b>	3 ans à partir de la date de production. Date d'expiration indiquée sur l'emballage.
<b>Durée d'utilisation :</b>	Jusqu'à 7 jours. A usage unique.
<b>Norme ISO :</b>	Connecteur ENFit® conforme à la norme ISO 80369-3.
<b>Marquage CE :</b>	Conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE. Une certification CE a été délivrée par un organisme notifié accrédité: TÜV SÜD (CE0123).
<b>Classification :</b>	Classe IIa.
<b>Fabricant légal :</b>	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
<b>Développement durable :</b>	Système de gestion de l'environnement conforme à la norme ISO 14001:2015.
<b>Matériaux :</b>	Tube : PVC. Tous les matériaux sont exempts de DEHP, BPA et de latex**. Informations supplémentaires sur demande.
<b>Pays d'origine :</b>	Fabriqué en Italie.

\*Certaines incompatibilités sont possibles.  
 \*\*Le DEHP et le BPA ne sont pas ajoutés intentionnellement au cours du processus de fabrication. Non formulé avec du latex de caoutchouc naturel.  
 Pour plus d'informations, veuillez contacter votre délégué médical Compat® ou visitez [www.compat.com](http://www.compat.com).  
 \*Sauf mention contraire, toutes les marques commerciales sont utilisées avec permission.