

Compat ella®

Combiset Compat Ella® 1.5 l

El Combiset Compat Ella® 1,5 l está indicado para la administración enteral de nutrientes, líquidos o medicación mediante la bomba Compat Ella®.

Características Generales

El Combiset 1,5 l de Compat Ella® cuenta con un contenedor Flexibaggle® de 1,5 l, un puerto de medicación de 3 vías y un extremo distal ENFit® (conexión con la sonda en el lado del paciente).

Nutrición Fiable: El Combiset 1,5 l de Compat Ella® incorpora la tecnología patentada de detención automática del flujo Auto-Anti -Free-Flow (AAFF). El sistema AAFF está integrado en el cassette y siempre está activo para garantizar la seguridad del paciente.


Conectores más Seguros: El Combiset 1,5 l de Compat Ella® incluye conectores ENFit® fabricados según la norma ISO 80369-3. Los conectores ENFit® han sido diseñados para ser incompatibles con la administración IV, con el objetivo de incrementar la seguridad del paciente impidiendo errores de conexión accidentales.

Comodidad: El contenedor de 1,5 l integrado, con soporte incorporado y tapón de rosca, ofrece un cómodo sistema abierto. La amplia abertura situada en la parte superior permite rellenarlo fácilmente de nutrientes o agua sin necesidad de detener la pauta de administración ni descolgar el contenedor.

Materiales Seguros: El contenedor de 1,5 l está fabricado en etilvinilacetato (EVA), un material suave e inócuo para los alimentos. El Combiset 1,5 l de Compat® Ella es estéril, y está libre de DEHP, BPA y látex*.

Compatibilidad:

- Sondas de nutrición enteral: ENFit®
- Jeringas de medicación: ENFit®

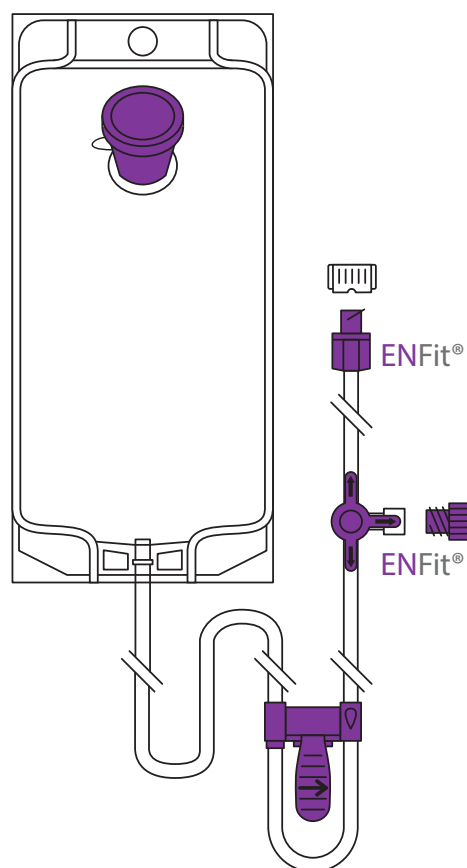


Información de Pedido

Descripción	Código	Unidad de venta
Compat Ella® Combiset 1,5 l	12298202	30

¿Conoces a Compat Ella®?

Combiset Compat Ella® 1.5 l

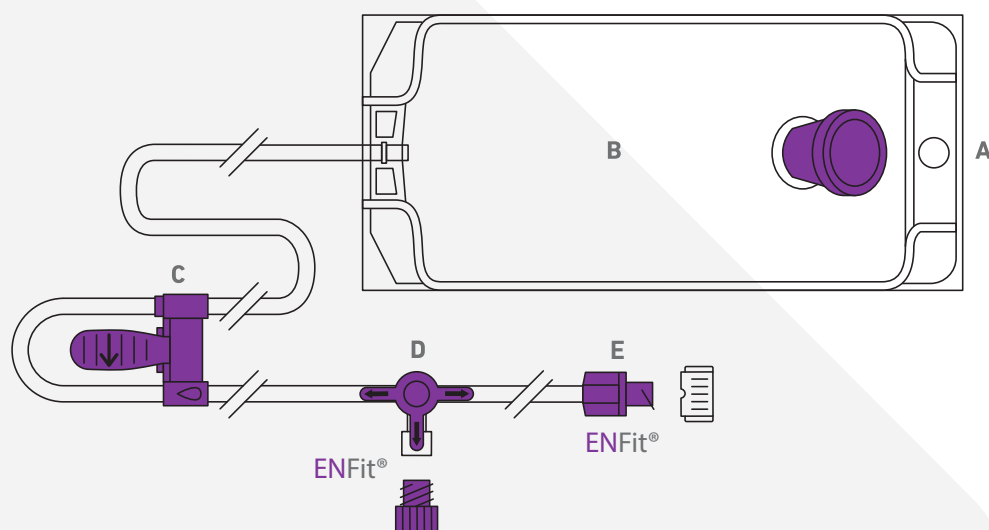

Componentes

- A** Gran abertura de llenado superior con tapón a rosca
- B** Contenedor Flexibaggle® de 1,5 l, con colgador integrado, fabricado en EVA con graduaciones (a los 50 ml y cada 100 ml) y etiquetas para el nombre del paciente y otra información importante (fórmula, volumen, fecha y velocidad).
- C** Casete para insertar en la bomba Compat Ella® con función de seguridad Auto-Anti-Free-Flow (AAFF) integrada y patentada
- D** Puerto de medicación de 3 vías ENFit® con tapón
- E** Extremo distal ENFit® con tapón (conexión con la sonda en el lado del paciente)

Especificaciones Técnicas

Estéril:	Esterilizado con óxido de etileno (EO).
Embalaje:	Embalado individualmente en cajas de 30 unidades (58,5 x 38,5 x 16 cm).
Almacenaje:	Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado del sol y la humedad.
Período de validez:	3 años a partir de la fecha de producción. Fecha de caducidad impresa en el embalaje.
Duración de uso:	24 horas. Un solo uso.
Longitud:	Distancia del Flexibaggle® a la conexión de la sonda en el lado del paciente: 230 cm. Distancia del Flexibaggle® a la bomba: 50cm.
Diámetros:	Diámetro interno nominal: 3,0 mm. Diámetro externo nominal: 4,15 mm.
Marca CE:	Cumple la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE. Certificación CE emitida por un Organismo Notificado acreditado: TÜV SÜD (CE0123).
Norma ISO:	Conector ENFit® fabricado de conformidad con la norma ISO 80369-3.
Clasificación:	Clase IIa.
Fabricante legal:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Sostenibilidad:	El sistema de gestión ambiental cumple con la norma ISO 14001:2015.
Materiales:	Conexiones: PVC y silicona. Todos los materiales están libres de DEHP, BPA y látex*. Detalles adicionales bajo solicitud.
País de origen:	Fabricado en Italia.

*No se añaden DEHP y BPA intencionadamente durante el proceso de fabricación. No están formulados con látex de caucho natural.

Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite www.compat.com

*Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales se utilizan con la debida autorización.

AXI00402 REV.2 28 JUNIO 2021

Compat®