

# Compat<sup>®</sup> DualPort

## Einlumige nasogastrale Ernährungs- und Drainage-Sonde mit Dualport

Compat<sup>®</sup> DualPort ist eine einlumige nasogastrale Sonde mit Zweifach Port für: 1) die enterale Verabreichung von Nahrung, Flüssigkeiten und Arzneimitteln über den ENFit<sup>®</sup> spezifischen enteralen Ernährungsport und 2) die gastrale Drainage/ intermittierende Aspiration des Mageninhalts über den trichterförmigen Drainage-Port.

### Funktionen auf einen Blick

**Für die Intensivstation entwickelt:** Compat<sup>®</sup> DualPort umfasst einen Trichteransatz sowie einen ENFit<sup>®</sup> Konnektor, um die Drainage gastrischer Flüssigkeiten und die Verabreichung von Nahrung, Flüssigkeiten und Arzneimitteln durch Verwendung einer einzigen Sonde für beide Vorgänge zu vereinfachen.

- Ermöglicht sowohl die gastrale Ernährung als auch die Drainage/Aspiration über eine einzige Sonde.
- Vermeidet die Platzierung einer zweiten Sonde bei Patienten, bei denen neben Drainage/Aspiration nachträglich auch die enterale Verabreichung von Nahrung notwendig ist.
- Verhindert ein Kollabieren bei Prüfung auf Rückstände im Magen.


Klemmen verhindern ein Auslaufen von Flüssigkeit und erleichtern die Aspiration von gastrischen Flüssigkeiten.

**Patientenkomfort:** Compat<sup>®</sup> DualPort besteht aus weichem röntgenkontrastfähigen Polyurethan mit einem abgerundeten distalen Ende für einen besseren Patientenkomfort.

**Platzierungshilfe:** Ein vormontierter, vorgeschmierter und offener Durchfluss-Mandrin ermöglicht eine einfachere Platzierung:

- Ermöglicht die Injektion von Wasser und röntgenkontrastfähigen Flüssigkeiten ohne Entfernen des Mandrins.
- Kann das Risiko einer Sondenverschiebung bei Entfernung des Mandrins reduzieren.

Compat<sup>®</sup> DualPort ist mit allen ENFit<sup>®</sup> Überleitsets und Spritzen sowie den meisten Drainage-/Aspirationssystemen kompatibel\*.

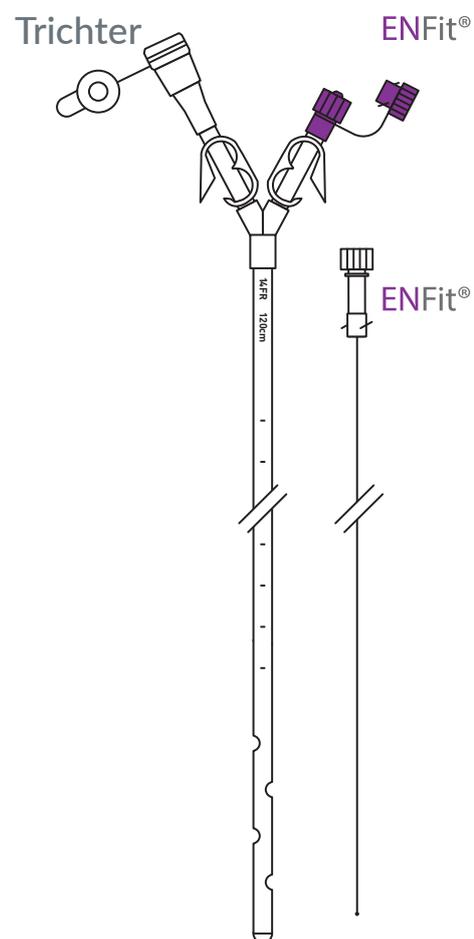


### Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Menge/Karton
Compat <sup>®</sup> DualPort 14 FR 120 CM S	12391311	20

Patientenversorgung. Unsere Priorität.

# Einlumige nasogastrale Ernährungs- und Drainage-Sonde mit Dualport

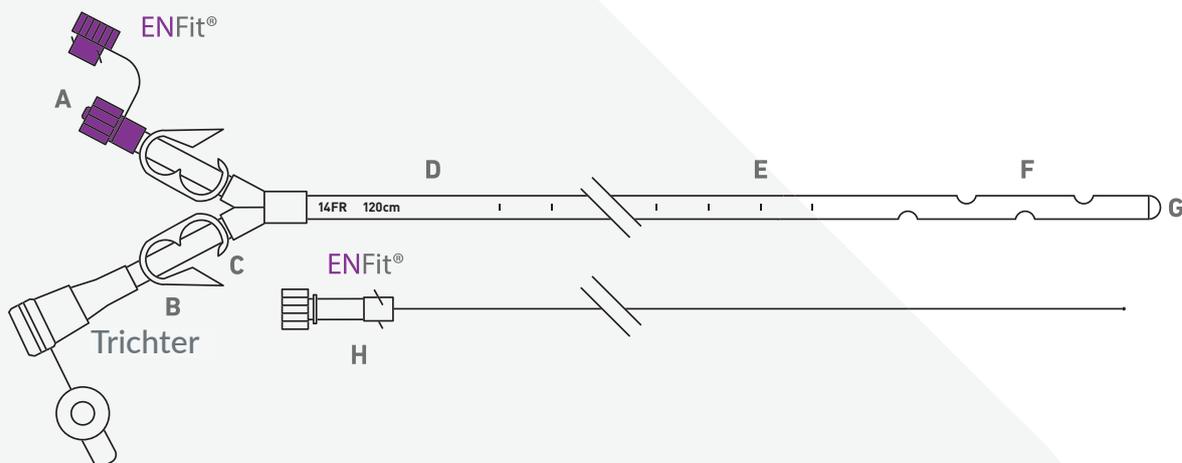

## Komponenten

- A ENFit® drehverriegelbarer Ernährungskonnektor mit Verschlusskappe
- B Trichterkonnektor mit Verschlusskappe; für die Kompatibilität mit den meisten Drainage-/Aspirationssystemen entwickelt\*
- C Schließklemmen
- D Produktkennzeichnung, French-Größe (FR) und Länge auf dem Schaft aufgedruckt
- E Röntgenkontrastfähiger Polyurethan-Sondenschaft mit Markierungen der Platzierungstiefe alle 5 cm
- F 4 alternierende seitliche Öffnungen
- G Abgerundetes distales Ende
- H Vormontierter, vorgeschmierter und offener Durchfluss-Mandrin

## Technische Daten

<b>Steril:</b>	Sterilisiert mit Ethylenoxid (ETO).
<b>Verpackung:</b>	Einzel verpackt in Kartons zu je 20 Stück (29,5 × 25 × 17 cm).
<b>Lagerung:</b>	In der Originalverpackung, bei einer Temperatur zwischen +5 und +40 °C und in einer trockenen Umgebung lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmestrahlung schützen.
<b>Haltbarkeit:</b>	3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
<b>Dauer der Anwendung:</b>	Bis zu 29 Tage. Zum Einmalgebrauch.
<b>Länge:</b>	120 cm.
<b>Durchmesser:</b>	14 FR.
<b>ISO-Norm:</b>	ENFit® Konnektor nach ISO 80369-3.
<b>CE-Kennzeichnung:</b>	Entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Eine CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten benannten Stelle ausgestellt: TÜV SÜD (CE 0123).
<b>Klassifizierung:</b>	Klasse IIa.
<b>Rechtmäßiger Hersteller:</b>	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
<b>Nachhaltigkeit:</b>	Das Umweltmanagementsystem entspricht ISO 14001:2015.
<b>Materialien:</b>	Schlauchsystem: Polyurethan. ENFit® Konnektor: Copolyester. Trichterkonnektor: Polyurethan. DEHP-, BPA- und Latex-frei**. Weitere Einzelheiten auf Anfrage.
<b>Herkunftsland:</b>	Hergestellt in Italien.

\*Es ist jedoch möglich, dass Inkompatibilitäten auftreten.  
\*\*DEHP und BPA werden während des Herstellungsprozesses nicht absichtlich zugesetzt. Enthält kein Naturkautschuklatex.  
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat® Vertriebsvertreter oder auf der Webseite unter [www.compat.com](http://www.compat.com)  
\*Sofern nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Zustimmung verwendet.