

Buddy gastrostomiknapp er en gastrostomiknapp med en lengde som tillater å sette den inn i en ny Compat® Buddy gastrostomiknapp. Gjennomgangen for å hindre at stomien lukkes. Forlengetsettet er kun beregnet til bruk på én pasient. Følg alltid lokalt gjeldende protokoller og prosedyrer for bruk, plassering, fjerning og stell av Compat® Buddy gastrostomiknapp med tilbehør. **⚠️ FORSIKTIG:** Plassering må utføres av eller under tilsyn av en lege. Størrelser (Fr og lengde) må forordnes av en lege.

UPOZORNENIE: Gastrostomický výživový gombík Compact® Budy je určený na diskrétnu zabezpečenie klinickej výživy po úspešnom prevedení gastrostomie. Toto zariadenie je dodávané v sterilnom stave a je určené na jednorazové použitie. Pred použitím skontrolujte, či góbsa súpravy nie je poškodená, ak je výrobok poškodený, nepoužívajte ho. **INDIKÁCIE NA POUŽITIE:** Gastrostomický výživový gombík Compact® Budy je indikovaný na použitie u pacientov, ktorí vyžadujú dlhodobú klinickú výživu, nie sú schopní tolerovať podávanie výživy ústami, je u nich nízko riziko aspirácie, prípadne vyžadujú dekompresiu žalúdka a/alebo podávajú lieky priamo do žalúdka. **KONTRAINDIKÁCIE:** Kontraindikácie pre použitie Gastrostomického výživového gombíka Compact® Budy zahŕňajú, nie sú však

For mer information, kontakta din försäljningsrepresentant eller gå in på www.compat.com.